

## ESTIMADO CLIENTE

Você acaba de adquirir um produto Vanzetti. Prezamos sempre pela qualidade dos nossos processos e pelo seu bem-estar!

## AVISO IMPORTANTE

Antes de utilizar o produto, mostre-o a um Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional para um melhor ajuste ao paciente.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantia do produto válida por 01 (um) ano a contar da data de saída.

### A GARANTIA COBRE

- Danos no material com quebras e rupturas de soldas;
- Defeitos de funcionamento mecânico;

### A GARANTIA NÃO COBRE

- Desgaste natural das peças devido ao uso incorreto do produto;
- Danos na tapeçaria.

### CUIDADOS

- O produto deve estar sempre seco e limpo;
- **Capacidade: o produto suporta usuários de até 40kg.**

### GENERALIDADES

- O fabricante não se responsabiliza por prejuízos em decorrência de acidentes e/ou má utilização;
- As peças na garantia serão substituídas por conta do fabricante (peças e transporte);
- Para dúvidas, reclamações e/ou sugestões, fale conosco:  
(19) 3542-5444 ou pelo e-mail: [humberto@vanzetti.com.br](mailto:humberto@vanzetti.com.br) ou [vanzetti@vanzetti.com.br](mailto:vanzetti@vanzetti.com.br)

CLIENTE: \_\_\_\_\_

NOTA FISCAL: \_\_\_\_\_

DATA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

PRODUTO: \_\_\_\_\_

Construindo seu bem-estar



/vanzettiararas



/vanzettiararas



/user/grupovanzetti



# Manual de Instruções Cadeira de Banho enxuta infantil




[vanzetti.com.br](http://vanzetti.com.br)



(19) 9 8894-2550



Abra a estrutura esticando a faixa;  
 Posicione os ganchos abaixo do assento da concha  
 entre os parafusos da estrutura **(A)** encaixando-os.

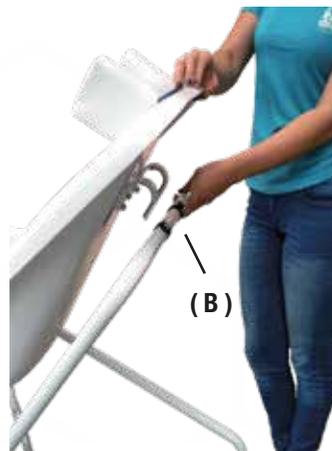

Faça o mesmo encaixando os ganchos do encosto  
 entre os parafusos da estrutura **(B)**.



Para regular a altura do apoio de cabeça, solte as  
 borboletas **(C)** atrás do encosto da concha



Mangueira flexível **(D)** para o escoamento de  
 água.

Para freiar a cadeira, pise no  
 suporte do freio dos rodízios **(E)**.

Ainda ficou com dúvidas? Acesse nosso site e assista o vídeo explicativo do produto.