

ESTIMADO CLIENTE

Você acaba de adquirir um produto Vanzetti. Prezamos sempre pela qualidade dos nossos processos e pelo seu bem-estar!

AVISO IMPORTANTE

Antes de utilizar o produto, mostre-o a um Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional para um melhor ajuste ao paciente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantia do produto válida por 01 (um) ano a contar da data de saída.

A GARANTIA COBRE

- Danos no material com quebras e rupturas de soldas;
- Defeitos de funcionamento mecânico;

A GARANTIA NÃO COBRE

- Desgaste natural das peças devido ao uso incorreto do produto;
- Danos na tapeçaria.

CUIDADOS

- O produto deve estar sempre seco e limpo;
- **Capacidade: o produto suporta usuários de até 100kg.**

GENERALIDADES

- O fabricante não se responsabiliza por prejuízos em decorrência de acidentes e/ou má utilização;
 - As peças na garantia serão substituídas por conta do fabricante (peças e transporte);
 - Para dúvidas, reclamações e/ou sugestões, fale conosco:
- (19) 3542-5444 ou pelo e-mail: humberto@vanzetti.com.br ou vanzetti@vanzetti.com.br

CLIENTE: _____

NOTA FISCAL: _____

DATA DA SAÍDA: _____

PRODUTO: _____

Construindo seu bem-estar



/vanzettiararas



/vanzettiararas



/user/grupovanzetti




Manual de Instruções Cadeira de Banho enxuta higiênica




vanzetti.com.br




(19) 9 8894-2550

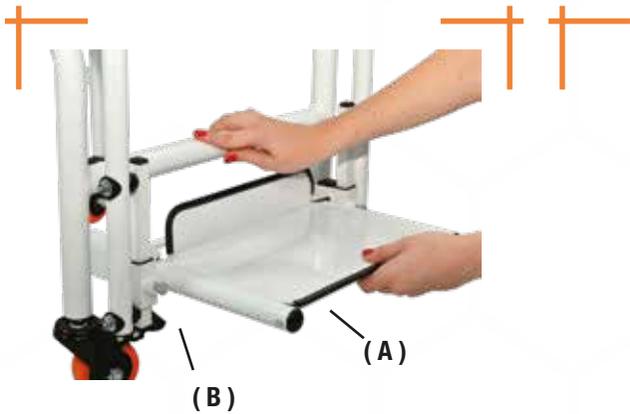

Encaixe o apoio de pés **(A)** e regule sua altura através do parafuso **(B)**.

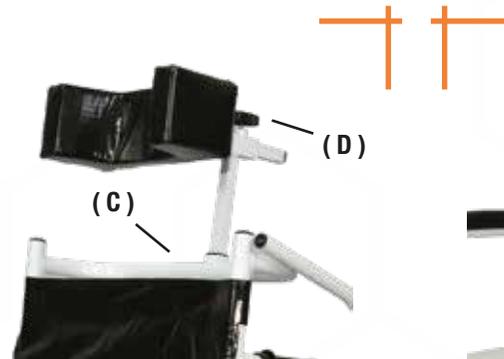


Encaixe o apoio de cabeça atrás do encosto **(C)**. Regule a altura e a profundidade de acordo com a necessidade do paciente e trave o manipulador **(D)**.

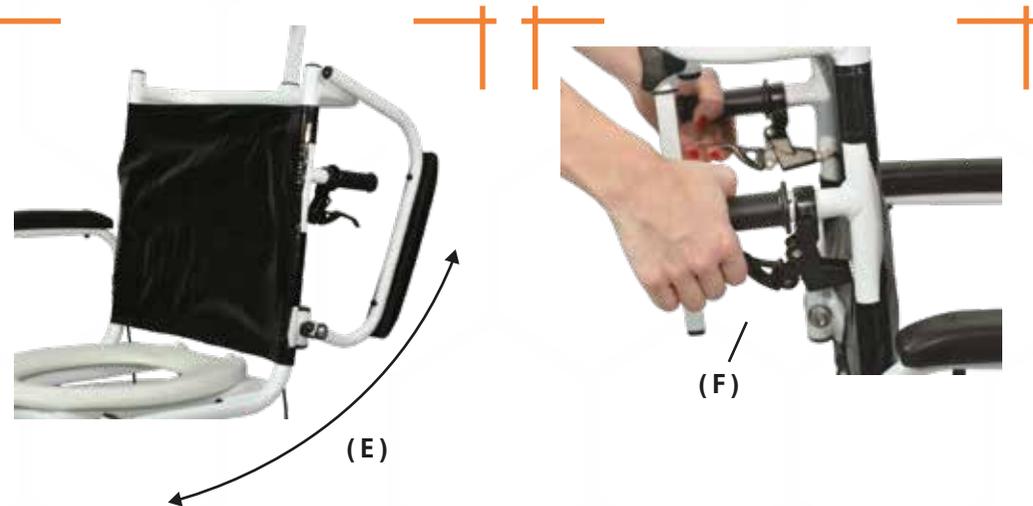

Para tirar, colocar ou transferir o paciente, levante o braço da cadeira **(E)**.

Para inclinar o conjunto assento/encosto acione a trava do manete **(F)**, soltando o conjunto.

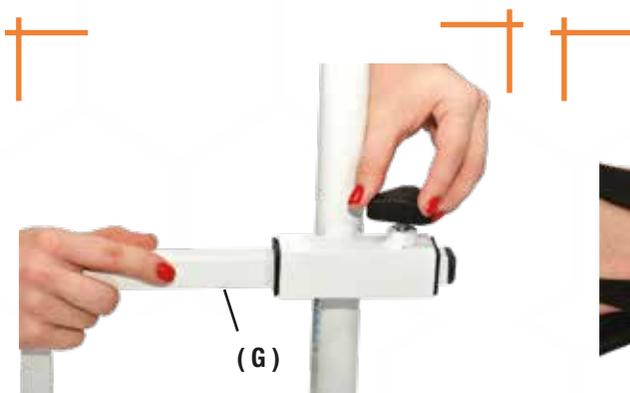

Ao inclinar o conjunto assento/encosto é indispensável encaixar os antitombo **(G)**.



Para freiar a cadeira, pise na trava do rodízio **(H)**.



Ainda ficou com dúvidas?
Acesse nosso site e assista o vídeo explicativo do produto.