

ESTIMADO CLIENTE

Você acaba de adquirir um produto Vanzetti. Prezamos sempre pela qualidade dos nossos processos e pelo seu bem-estar!

AVISO IMPORTANTE

Antes de utilizar o produto, mostre-o a um Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional para um melhor ajuste ao paciente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantia do produto válida por 01 (um) ano a contar da data de saída.

A GARANTIA COBRE

- Danos no material com quebras e rupturas de soldas;
- Defeitos de funcionamento mecânico;

A GARANTIA NÃO COBRE

- Desgaste natural das peças devido ao uso incorreto do produto;
- Danos na tapeçaria.

CUIDADOS

- O produto deve estar sempre seco e limpo;
- **Capacidade: o produto suporta usuários de até 100kg.**

GENERALIDADES

- O fabricante não se responsabiliza por prejuízos em decorrência de acidentes e/ou má utilização;
- As peças na garantia serão substituídas por conta do fabricante (peças e transporte);
- Para dúvidas, reclamações e/ou sugestões, fale conosco:
(19) 3542-5444 ou pelo e-mail: humberto@vanzetti.com.br ou vanzetti@vanzetti.com.br



Manual de Instruções Andador europa

CLIENTE: _____

NOTA FISCAL: _____

DATA DA SAÍDA: _____

PRODUTO: _____

Construindo seu bem-estar



/vanzettiararas



/vanzettiararas




/user/grupovanzetti




vanzetti.com.br



(19) 9 8894-2550

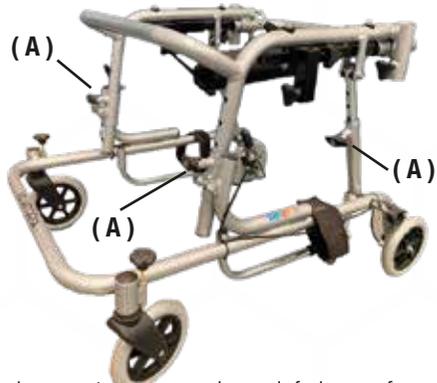


Encaixar a estrutura superior na inferior, conforme imagem. Para isso, puxe e gire os 4 manipulós (A) encaixando os 4 tubos. Eles também servem para regular a altura do andador.

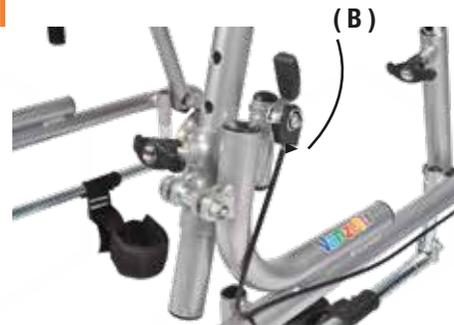


Primeiro frear o andador girando a alavanca (B) para baixo.

POSICIONAR O PACIENTE

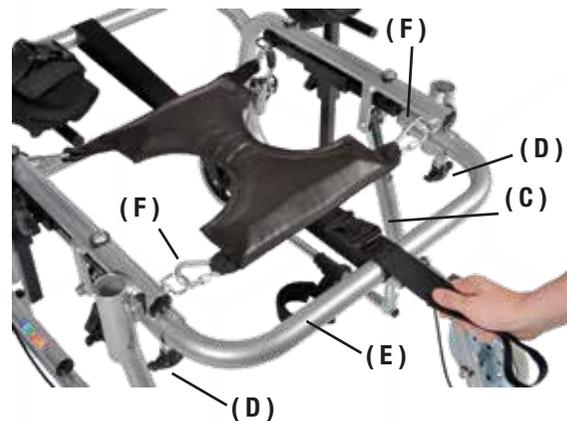

- * Solte a fivela (C);
- * Puxe e gire os manipulós (D);
- * Puxe a trava (E), retirando-a;
- * Solte o fraldão traseiro (F) através dos mosquetões;
- * Posicione o paciente dentro do andador;
- * Encaixe a trava (E);
- * Passe por entre as pernas do paciente a faixa e o fraldão;
- * Passe a faixa na trava (E), fechando com a fivela (C);
- * Prenda os mosquetões (F) no andador.

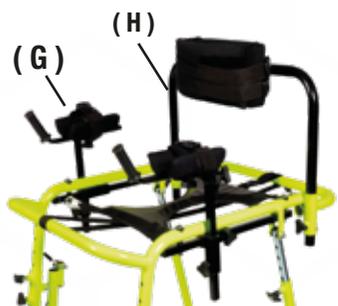

Encaixe o braço calha (G) e o apoio de tronco (H).



Direcione a roda dianteira apertando o manipulós (J).



Para inclinar a estrutura do andador, coloque nos furos debaixo nos tubos traseiros (I).



Para acionar o freio anti recuo, aperte o pino (K) e abaixe o freio.



Ainda ficou com dúvidas?

Acesse nosso site e assista o vídeo explicativo do produto.