

ESTIMADO CLIENTE

Você acaba de adquirir um produto Vanzetti. Prezamos sempre pela qualidade dos nossos processos e pelo seu bem-estar!

AVISO IMPORTANTE

Antes de utilizar o produto, mostre-o a um Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional para um melhor ajuste ao paciente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantia do produto válida por 01 (um) ano a contar da data de saída.

A GARANTIA COBRE

- Danos no material com quebras e rupturas de soldas;
- Defeitos de funcionamento mecânico;

A GARANTIA NÃO COBRE

- Desgaste natural das peças devido ao uso incorreto do produto;
- Danos na tapeçaria.

CUIDADOS

- O produto deve estar sempre seco e limpo;
- **Capacidade: o produto suporta usuários de até 60kg.**

GENERALIDADES

- O fabricante não se responsabiliza por prejuízos em decorrência de acidentes e/ou má utilização;
 - As peças na garantia serão substituídas por conta do fabricante (peças e transporte);
 - Para dúvidas, reclamações e/ou sugestões, fale conosco:
- (19) 3542-5444 ou pelo e-mail: humberto@vanzetti.com.br ou vanzetti@vanzetti.com.br

CLIENTE: _____

NOTA FISCAL: _____

DATA DA SAÍDA: _____

PRODUTO: _____

Construindo seu bem-estar



/vanzettiararas



/vanzettiararas



/user/grupovanzetti



MODELO STANDART

Manual de Instruções Andador


EXPLORER




vanzetti.com.br



(19) 9 8894-2550

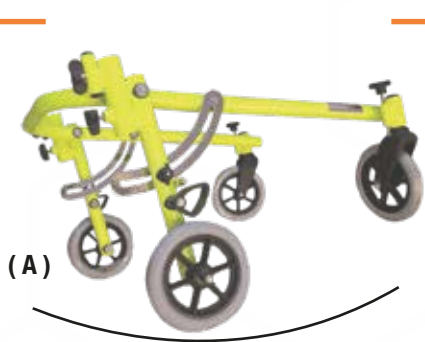

Para montar a estrutura inferior, basta abri-la conforme apontado pela seta. Depois apertar a borboleta (A).

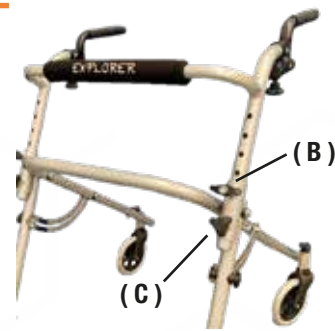


Encaixar a estrutura superior na estrutura inferior e regular sua altura através do manípulo (B) puxando e girando-a. Acertada a altura, apertar o manípulo (C) para prender a estrutura superior.


***Para retirá-lo, primeiro solte o manípulo (C) para depois puxar e girar o manípulo (B).**




Para direcionar as rodas dianteiras, rosqueie o manípulo (D) encaixando no furo do garfo plástico.

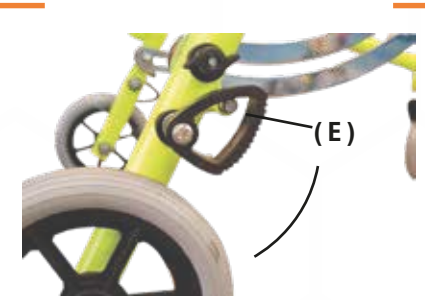


Para liberar o freio anti recuo, aperte o pino (E) e solte o freio na roda, conforme desenho.

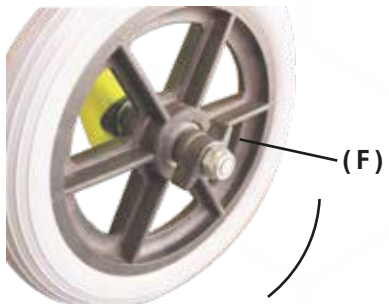

Para regular a carga na roda, gire a borboleta (F).

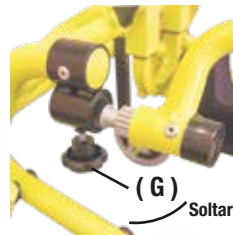

Para ajustar o apoio de mão, solte o manípulo (G) e puxe o apoio, escolha a posição desejada e aperte novamente o manípulo (G).

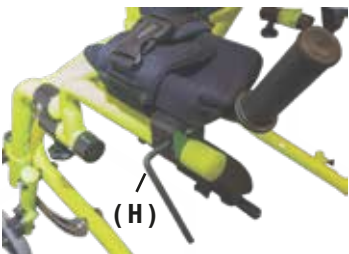


Para regular a posição do braço calha, solte e aperte com a chave (H) encaixada na estrutura do andador.

***Aperte os 2 parafusos um pouco de cada vez.**



Para regular a profundidade do braço calha, solte e volte a apertar o manípulo (I).

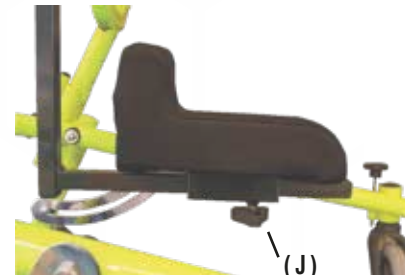

Para regular a profundidade do selim, use o manípulo (J)



Para regular a cinta ronco, solte e volte a apertar a borboletas (K) atrás do suporte.



Ainda ficou com dúvidas? Acesse nosso site e assista o vídeo explicativo do produto.