

ESTIMADO CLIENTE

Você acaba de adquirir um produto Vanzetti. Prezamos sempre pela qualidade dos nossos processos e pelo seu bem-estar!

AVISO IMPORTANTE

Antes de utilizar o produto, mostre-o a um Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional para um melhor ajuste ao paciente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantia do produto válida por 01 (um) ano a contar da data de saída.

A GARANTIA COBRE

- Danos no material com quebras e rupturas de soldas;
- Defeitos de funcionamento mecânico;

A GARANTIA NÃO COBRE

- Desgaste natural das peças devido ao uso incorreto do produto;
- Danos na tapeçaria.

CUIDADOS

- O produto deve estar sempre seco e limpo;
- **Capacidade: o produto suporta usuários de até 70kg.**

GENERALIDADES

- O fabricante não se responsabiliza por prejuízos em decorrência de acidentes e/ou má utilização;
 - As peças na garantia serão substituídas por conta do fabricante (peças e transporte);
 - Para dúvidas, reclamações e/ou sugestões, fale conosco:
- (19) 3542-5444 ou pelo e-mail: humberto@vanzetti.com.br ou vanzetti@vanzetti.com.br

CLIENTE: _____

NOTA FISCAL: _____

DATA DA SAÍDA: _____

PRODUTO: _____

Construindo seu bem-estar



/vanzettiararas



/vanzettiararas



/user/grupovanzetti



Manual de Instruções Cadeira de Rodas


Prisma




vanzetti.com.br



(19) 9 8894-2550

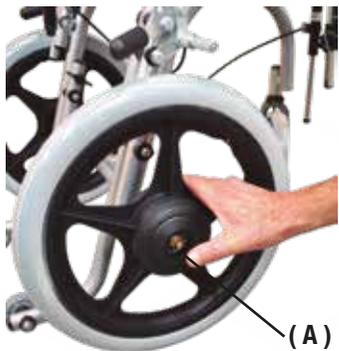

Encaixe a roda traseira apertando o pino **(A)**, empurre-a até o fim e solte o pino. Verifique se a roda ficou presa. Para retirá-la, aperte o pino **(A)** novamente e puxe-a.

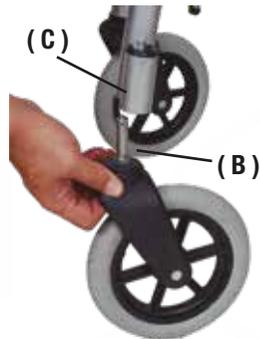


Para colocar a roda dianteira, aperte o pino **(B)** encaixe no eixo do rolamento **(C)** e empurre até o fim. Solte o pino e verifique se ela ficou presa. Para retirá-la, aperte o pino e puxe-a.



Para encaixar a concha, posicione-a acima do trilho preto. Puxe para baixo o manípulo **(D)** e empurre a concha até o fim. Solte o manípulo e encaixe seu pino no trilho. Verifique se a concha ficou presa no trilho. Para soltar a concha, puxe o manípulo para baixo e depois para trás, trazendo também a concha.



Encaixe o apoio de pés abaixo do assento **(E)**. Regule sua altura e profundidade. Para ajustar a altura e profundidade do apoio de pés, deixe solto os 4 manípulos e só aperte após definir a posição desejada.

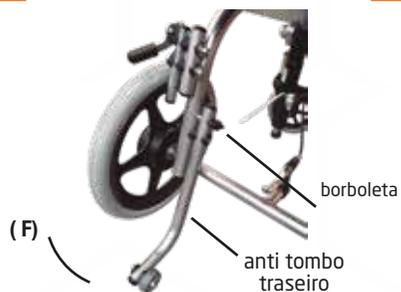

Antes de inclinar a concha ou o encosto, puxe o anti tombo traseiro como segurança. Para isso, desça o anti tombo até o chão **(F)** encaixando o pino da borboleta na estrutura da cadeira. Para retornar o anti tombo, gire a borboleta e puxe-o para cima.



Para inclinar a concha, pise no pedal **(G)** e puxe-a para trás inclinando-a.



É ESTRITAMENTE PROIBIDO USAR O CONJUNTO ASSENTO/ENCOSTO DA CADEIRA DE RODAS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE NO CARRO.

POIS A MESMA CONTÉM PARTES METÁLICAS QUE PODEM PREJUDICAR O PACIENTE EM CASO DE ACIDENTES.